

选择 简易的操作装置



swissmade 

两步式自动注射器

- 皮肤按压式注射，操作简单、舒适
- 清晰的“咔哒”声反馈和大视窗剂量显示，便于操作，增强患者信心
- 纤细、短小且舒适的设计为您的药物提供与众不同的外观
- 针对不同目标患者群体的独特设计
- 久经考验的平台产品确保低风险和较短的上市时间

新设计



更多信心, 更多成功 – Ypsomed Delivery Systems


YPSOMED
自我护理解决方案



YpsoMate® 两步式自动注射器

移除笔帽，在皮肤上按压注射——操作如此简单

YpsoMate®自动注射器是适用于所有患者群体的一次性自动注射装置，适用于1ml预灌封玻璃或聚合物注射器。它通过按压皮肤启动注射，方便、舒适并且深受患者喜爱。

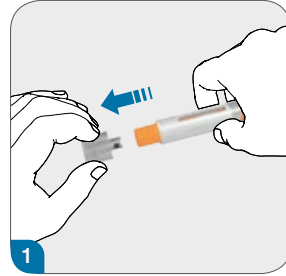

1 移除笔帽



2 注射



简直完美的设计

满足患者需求和制药行业要求

操作性

- 优化的人体工学设计提供了良好的操控感
- 始终隐藏的针头增加了舒适性
- 针头插入、注射结束以及针头保护装置启动之后，清晰可闻的“咔哒”声反馈增强了患者的信心

安全性

- 与针头保护罩类型无关的前肩式注射器支架，提高了产品安全性
- 注射器窗口由透明塑料覆盖，增强产品在运输过程中或跌落后注射器破损时的安全性
- 注射器窗口可以根据保护光敏产品的要求着色
- 使用前、使用过程中和使用后针头都得到保护，避免意外的针刺伤害
- 可重复使用的培训装置，可供患者和医生用于模拟和练习使用


定制和生产

- 满足不同灌装量和粘度的配置能力使这个平台能够用于多个项目
- 简单的最终装配流程和Ypsomed的技术支持保证产品的低成本
- 经验丰富的ODM制造商提供成熟产品，保证项目时间短并且风险低
- 与所有主要厂商生产的玻璃和聚合物注射器兼容

作为患者，对我而言什么是最重要的：

“自我注射帮助我解决自己的问题，当我完成注射后，我总是感觉到很轻松。自动注射器至关重要的要求就是确保剂量完全注射。YpsoMate®自动注射器在注射完成后给出了非常清晰的咔哒声信号。这对于我非常重要，因为这样我不需要保持针头超过必要的时间并且我确信我得到了我所需要的治疗。”

Susan, 63岁, 关节炎患者

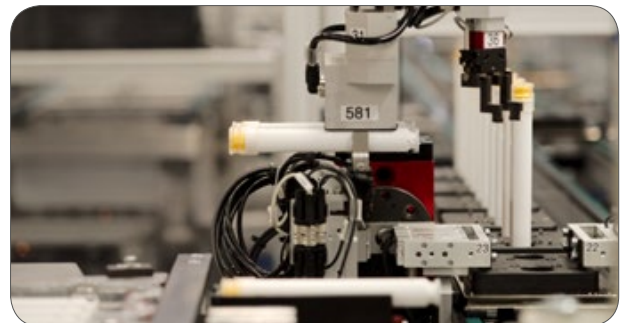

瑞士Ypsomed生产车间里的YpsoMate®自动注射器全自动生产线



设计和定制

您的药物值得拥有独一无二的外观

YpsoMate®的设计可以根据独特的剂量要求以及特定患者和市场需求来定制。YpsoMate®在短时间内可待且有两种平台设计形状——方形和圆形——以及大量的颜色范围可供选择。基于在标准 YpsoMate®自动注射器外围使用个性化外壳的设计理念，自由形状的个性化设计用于明显的市场区分是可行的。如需要进一步的设计支持请随时联系我们或者让您的设计专家和我们联系。



尺寸和规格

事实与数据




装置规格

主容器	1 ml 长 ½" PFS
灌装量	0.2–1.0 ml
剂量	固定, 完整的剂量
粘度	1–35 cP
注射时间	< 10 s*

* 取决于灌装量、粘度和针头直径

针头直径	29G TW 及更大直径
PFS 针头保护套	硬质或者软质
针头刺入长度	5–8 mm
注射完成后反馈	听觉和视觉反馈
重量	35 g 包括玻璃 PFS

注射器尺寸 (mm)

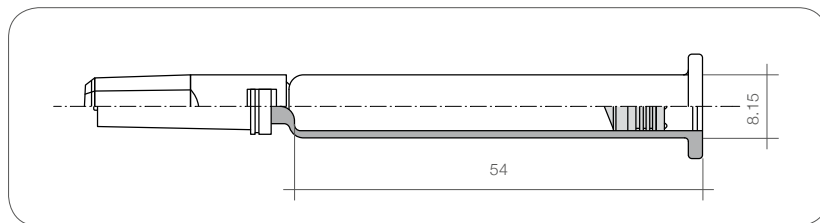

标准装置与 1 ml ½" 带针注射器兼容



您的给药系统

借助我们的经验和竞争力

- Ypsomed拥有超过30年的丰富的注射装置开发和制造经验，大量装置已在市场上广泛销售。
- 您可以从Ypsomed获得高质量的支持服务，包括选择药物的初级包材、定制注射笔的工业设计、验证剂量准确性及准备该组合产品注册所需的通用技术文件（CTD）。

更多信心。
更加成功。
拥有Ypsomed输注系统。



注射笔系统



自动注射器系统



贴式输注系统



智能服务

Ypsomed输注系统为生物制药公司提供全系列的药物输注产品和服务。我们提供从开发和设计到制造、包装的一切，让患者和客户信心倍增，并带来丰富的市场收益。

医沛生医疗器械技术咨询(北京)有限公司 // 中国北京市朝阳区亮马桥路50号 //
燕莎中心写字楼C513A // 邮编: 100125 // info@ypsomed.cn // www.ypsomed.cn // 电话: 0086 10 6461 5168